

# BRUDYAL PLUS MULTI

**BRUDYAL PLUS MULTI** es una solución humectante y lubricante ocular, estéril y con un pH fisiológico, a base de hialuronato sódico y agua destilada de aciano azul y manzanilla, en envase multidosis, con capacidad nominal para 10 ml, sin conservantes.

El hialuronato sódico ofrece un efecto hidratante y lubricante, que contrarresta la sequedad ocular y crea una película protectora en el epitelio corneal frente a los agentes externos y frente al daño causado por los radicales libres. La manzanilla es conocida en medicina popular por sus propiedades calmantes y refrescantes y, por lo tanto, está indicada para aliviar el dolor y el enrojecimiento de la mucosa ocular causada por agentes atmosféricos y factores ambientales. El aciano azul es conocido por su capacidad hidratante y sus propiedades anti-enrojecimiento. La fórmula también incluye cloruro sódico, tampones fosfato, fosfato sódico dibásico heptahidratado, y fosfato sódico monobásico dihidrato para garantizar una solución fisiológica.

## COMPOSICIÓN

Agua destilada de aciano azul, agua destilada de manzanilla, hialuronato sódico, fosfato sódico dibásico heptahidratado, fosfato sódico monobásico dihidrato, cloruro sódico, A.P.I. (agua para inyección). **BRUDYAL PLUS MULTI** es una solución estéril, que no contiene conservantes.

## USO PREVISTO

**BRUDYAL PLUS MULTI** está indicado en la sequedad ocular o en las molestias de la mucosa ocular debidas a:

- Factores ambientales (aire acondicionado, radiación solar excesiva, viento, humo, contaminación, natación en agua de mar o en agua de piscina).
- Sequedad ocular debida a la fatiga excesiva tras largas horas de trabajo con ordenador, estudio prolongado, o debido al síndrome de ojo seco.
- Uso excesivo diario de lentes de contacto.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Arranque el precinto de seguridad antes de la primera administración.

2. Retire el tapón protector.
3. Presione el envase e instile 2 o 3 gotas en el ojo, tantas veces como lo necesite.
4. El vaciado gradual del envase puede estar asociado a la necesidad de tener que ejercer una presión más elevada que permita el suministro del producto. Ello se debe a las propiedades del sistema de cierre, que actúa para conservar la esterilidad y las características físicas y químicas de las soluciones sin conservantes.

Tras el uso, cerrar el envase: el contenido puede ser utilizado en los próximos 3 meses desde la primera apertura.

Es adecuado para el uso frecuente, de varias veces al día, según las indicaciones específicas del médico consultor.

El producto puede ser utilizado por los usuarios de lentes de contacto, sin necesidad de retirarlas.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- El producto es exclusivamente para el uso ocular.
- El producto esta destinado para el uso de un solo paciente.
- No utilice el producto si el envase está dañado o no está perfectamente cerrado cuando lo abra por primera vez.
- Durante la aplicación, no toque el ojo ni ninguna otra superficie con la punta del dispensador del envase.
- No usar en caso de intolerancia conocida hacia cualquiera de los ingredientes.
- No almacenar por encima de 30°C.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja.
- En caso de efectos secundarios durante el uso, interrumpa el tratamiento y consulte a un médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- El contenido debe usarse dentro de los 3 meses posteriores a la primera apertura.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

No se conocen efectos secundarios indeseables hasta el momento.

## CONTENIDO

Envase de 10 ml de solución estéril sin conservantes.

## CONDICIONES DE ALMACENAJE

Guardar por debajo de 30°C.

El contenido del envase multidosis debe ser utilizado dentro de los 3 meses posteriores a la primera apertura.

## CADUCIDAD

No utilice el producto cuando exceda la fecha de caducidad que figura en la caja y en la etiqueta.

 **COC Farmaceutici s.r.l.**

Via Modena, 15

40019 Sant'Agata Bolognese (Bo)

ITALIA

## DISTRIBUIDO POR

**BRUDYLAB, S.L.**

Riera de Sant Miquel, 3, 2º 4ª

08006 Barcelona

ESPAÑA

STERILE A

  
0373  
DISPOSITIVO  
MÉDICO



Texto revisado en: 02.01 del 06/2017



BRUDYLAB®