

BRUDYAL

SOLUÇÃO HIDRATANTE

Mais cómodo e fácil

Agora, na compra de BRUDYAL monodoses,
um aplicador grátis



Uma ajuda no tratamento com lágrimas artificiais

- BRUDYAL monodoses é uma solução de ácido hialurónico a 0,10% SEM CONSERVANTES
- Alta hidratação e lubrificação ocular **a um preço acessível**
- Usar o aplicador ajuda a aproveitar ao maximo cada monodose
- Além disso, o risco de lesões oculares ligeiras ou desconforto é reduzido



BRUDYLAB®



▲
Digitalize o QR
e descubra
como funciona
o aplicador

BRUDYAL


SOLUÇÃO HIDRATANTE

Colocar lágrimas artificiais nunca foi tão fácil


Adequado a pessoas destras e esquerdinas



Como BRUDYAL funciona com o aplicador?

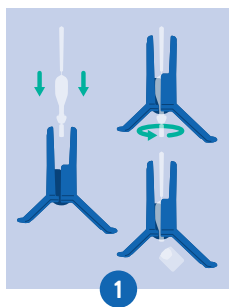


1
Introduzir a monodose fechada no aplicador. Uma vez dentro, remova a tampa girando a aba quadrada do recipiente.

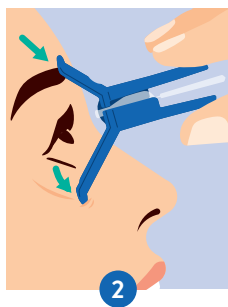

2
Coloque o aplicador na órbita. A aba superior deve ser colocada na sobrancelha e a aba inferior na pálpebra inferior.



3
Incline a cabeça para trás.

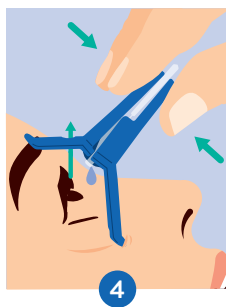

4
Olhe pelo orifício em direção ao teto e aperte o aplicador. **A gota entrou no olho sem desconforto!**

