


Test de la Rejilla de Amsler

- Sitúese a una distancia de 30-40 cm de la rejilla.
- No debe quitarse las gafas o lentillas si las usa normalmente.
- Cúbrase un ojo y mire fijamente el punto central de la cuadrícula.
- Si las líneas alrededor del punto aparecen onduladas, deformadas o borrosas en algún punto, usted puede tener afectada la mácula y no debe posponer la visita a su oftalmólogo.
- Repita el mismo proceso con el ojo contrario.

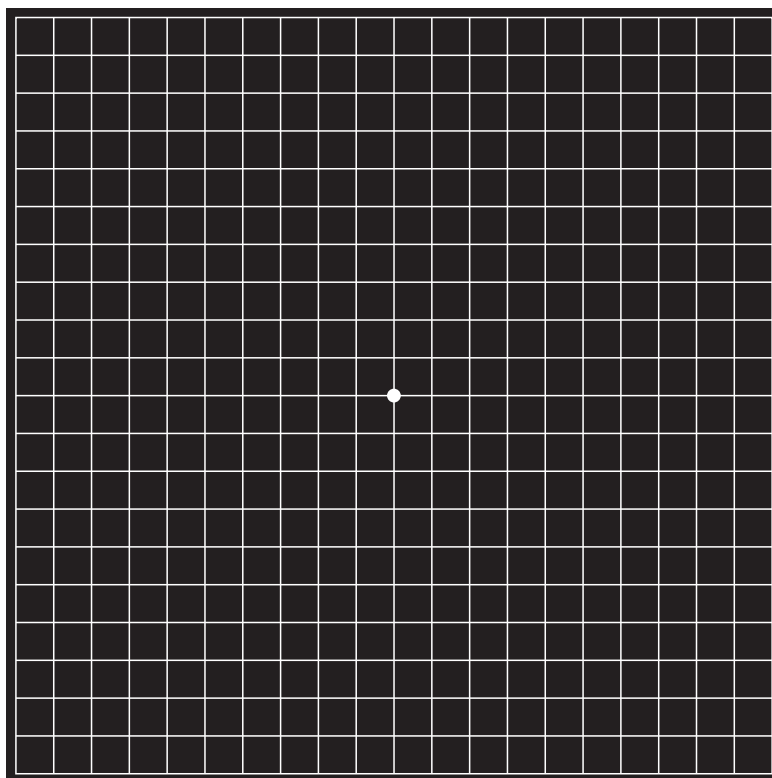

*La rejilla tiene un tamaño de 10x10 cm (0,5 cm cada cuadrado).

BRUDYLAB

Ulises, 108, 2ºC. 28043 Madrid. Tel. 91 300 10 14. www.brudylab.com

Venta en farmacias, teléfono gratuito 900 12 12 50 y www.brudyshop.com



BRUDYLAB®