


## Test de la Rejilla de Amsler

- Sitúese a una distancia de 60 cm de la rejilla.
- No debe quitarse las gafas o lentillas si las usa normalmente.
- Cúbrase un ojo y mire fijamente el punto central de la cuadrícula.
- Si las líneas alrededor del punto aparecen onduladas, deformadas o borrosas en algún punto, usted puede tener afectada la mácula y no debe posponer la visita a su oftalmólogo.
- Repita el mismo proceso con el ojo contrario.

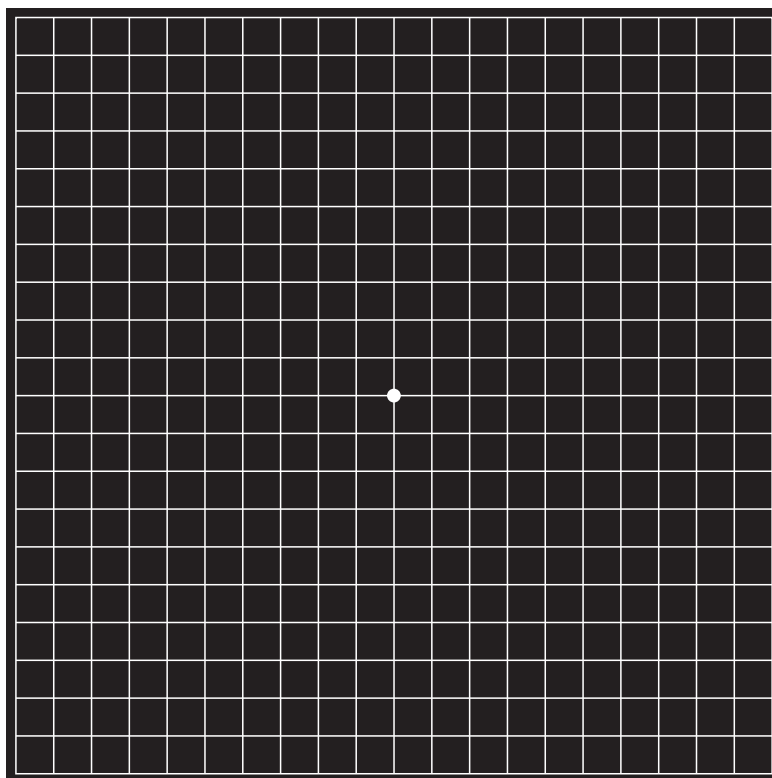

\*La rejilla tiene un tamaño de 10x10 cm (0,5 cm cada cuadrado).

**BRUDYLAB**

Ulises, 108, 2ºC. 28043 Madrid. Tel. 91 300 10 14. [www.brudylab.com](http://www.brudylab.com)

Venta en farmacias, teléfono gratuito 900 12 12 50 y [www.brudyshop.com](http://www.brudyshop.com)



**BRUDYLAB**®