


Teste da Grelha Amsler

- Coloque a grelha a 60 cm de distância.
- Não retire óculos ou lentes de contacto se usa normalmente.
- Cubra um olho e olhe para o ponto central da grelha.
- Se as linhas ao redor do ponto parecerem onduladas ou deformadas, poderá ter a mácula afetada e não deve adiar a visita ao seu oftalmologista.
- Repita o mesmo processo com o olho oposto.

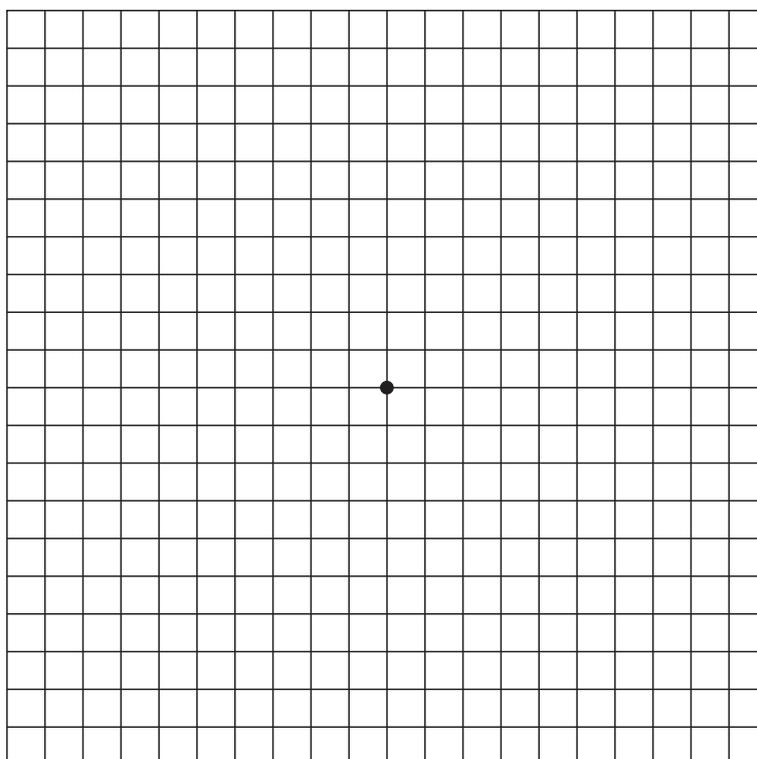

*A grelha tem um tamanho de 10x10 cm (0,5 cm cada quadrado).

BRUDYLAB

Riera de Sant Miquel, 3 2º 4ª. 08006 Barcelona

Tel. +34 932 170 366. www.brudylab.com

Venda em farmácias e www.brudishop.com



BRUDYLAB®