
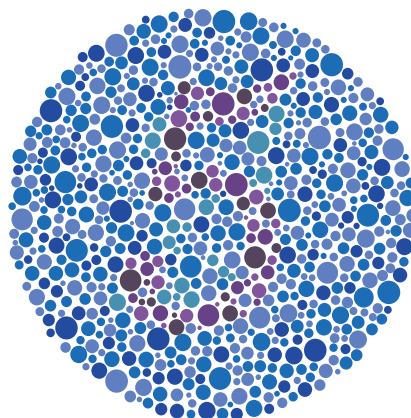
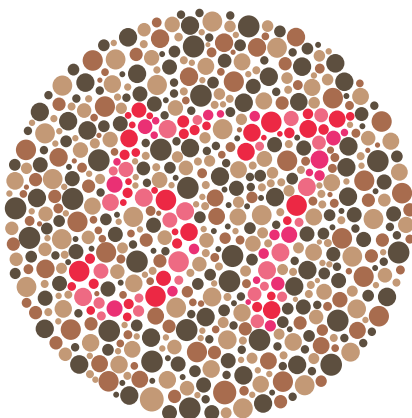
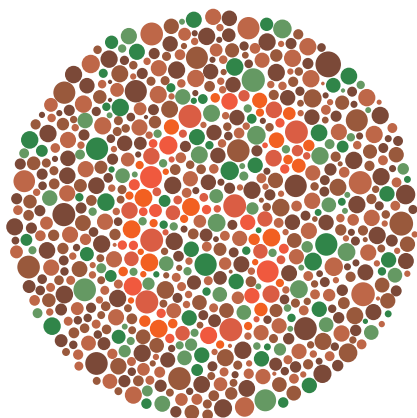
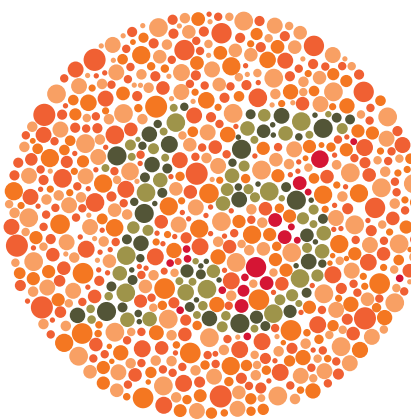
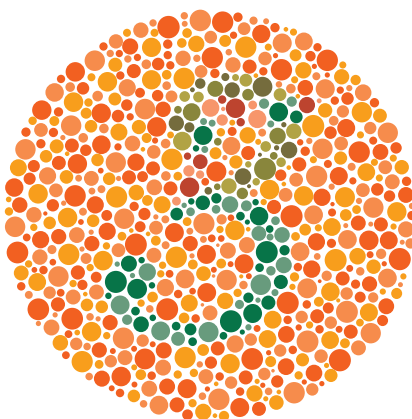
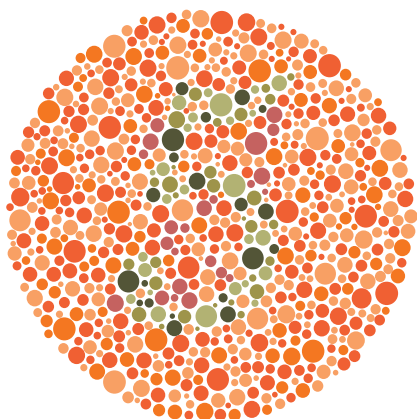
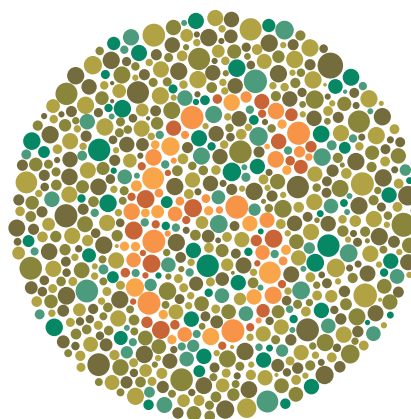
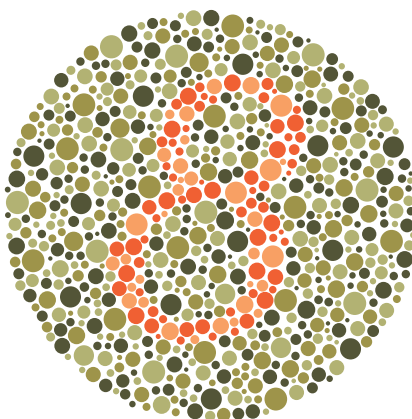


Teste de Ishihara para o daltonismo

O Teste de Ishihara, criado pelo Dr. Shinobu Ishihara em 1917, é um teste essencial para diagnosticar o daltonismo. Utiliza imagens com padrões de pontos coloridos que formam números visíveis apenas por pessoas com anomalia da visão. Trata-se de uma ferramenta simples, mas eficaz, para identificar defeitos visuais.

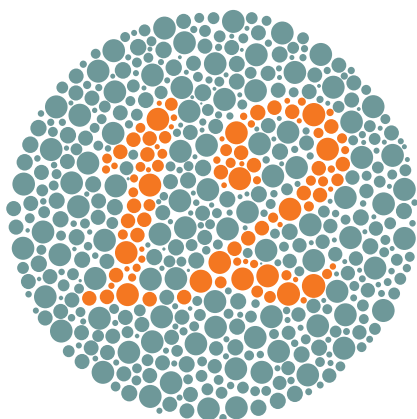

Tome nota do número que vê em cada uma das imagens. Quando tiver terminado, compare-o com o valor que lhe indicamos a seguir.

A realização deste teste de daltonismo tem um carácter meramente informativo e não exclui, em circunstância alguma, a consulta de um oftalmologista.

Interpretação dos resultados:

- 12 Igual para pessoas com e sem deficiência cromática
- 8 3 para pessoas com daltonismo e acromatopsia total se não vir nenhum número
- 6 5 para pessoas com daltonismo e acromatopsia total se não vir nenhum número
- 5 2 para pessoas com daltonismo e acromatopsia total se não vir nenhum número
- 3 5 para pessoas com daltonismo e acromatopsia total se não vir nenhum número
- 15 17 para pessoas com daltonismo e acromatopsia total se não vir nenhum número
- 6 As pessoas com daltonismo ou acromatopsia total não o podem ler, ou estará incorreto
- 57 As pessoas com daltonismo ou acromatopsia total não o podem ler, ou estará incorreto
- 5 As pessoas com daltonismo ou acromatopsia total não o podem ler, ou estará incorreto

BRUDYLAB

Riera de Sant Miquel, 3 2º 4ª. 08006 Barcelona

Tel. +34 932 170 366. www.brudylab.com

Venda em farmácias e www.brudyshop.com



BRUDYLAB®